

# La bonne utilisation de l'indicateur de stérilisation Mini Steam-Star Prion G


## Principe

Les indicateurs de stérilisation Mini Steam-Star Prion G permettent le contrôle de la qualité de la stérilisation en autoclave à vapeur d'eau lors des cycles prion 134°C/18 min. en présence de vapeur d'eau saturée.


## Utilisation

- Placer les indicateurs Mini Steam-Star Prion G dans les emballages de stérilisation au contact des dispositifs à stériliser, face imprimée visible à travers la face plastique transparente des sachets.
- Démarrer le cycle de stérilisation Prion de l'autoclave.
- A la fin du cycle, observer la couleur des pastilles sur les indicateurs.


## Lecture et Interprétation :

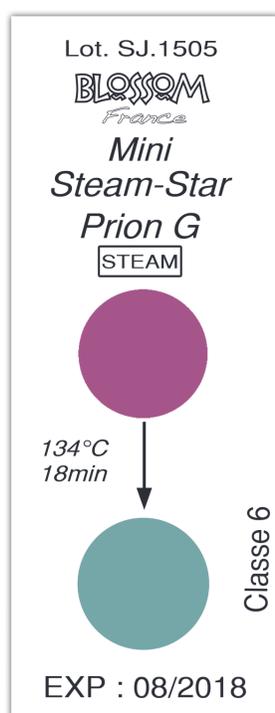

Indicateur avant stérilisation

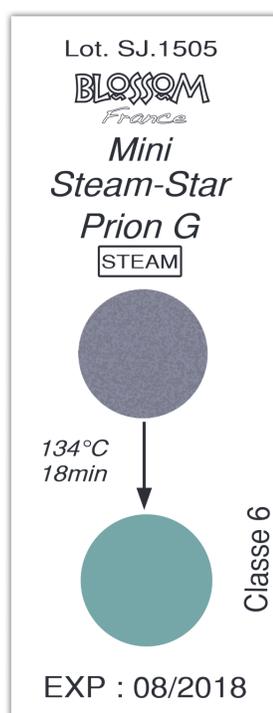

Indicateur après stérilisation **NON CONFORME**

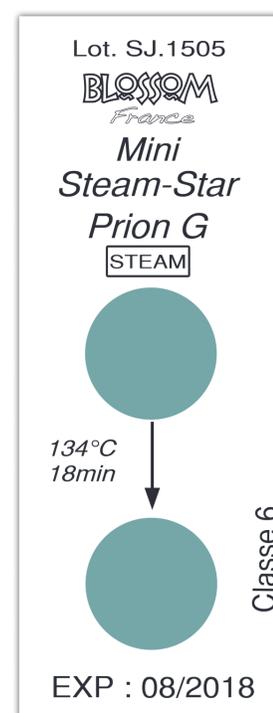

Indicateur après stérilisation **CONFORME**

La pastille rouge/bordeaux doit avoir viré au vert indiquant ainsi que les 3 paramètres de la stérilisation (température, temps, vapeur d'eau saturée) ont bien été respectés et que la stérilisation Prion a été correctement effectuée.

### Résultat **conforme** :

- La stérilisation a été correctement effectuée
- La charge peut être acceptée.

### Résultat **non conforme**

- La stérilisation n'a pas été correctement effectuée et la charge doit être refusée.
- Un nouveau cycle de stérilisation doit être réalisé.
- Si le virage des indicateurs est toujours non conforme après le nouveau cycle de stérilisation, un contrôle technique de l'autoclave et une analyse de la charge doivent être effectués.