

# La bonne utilisation de l'indicateur de stérilisation Steam-Star


## Principe

Les indicateurs de stérilisation Steam-Star permettent le contrôle de la qualité de la stérilisation en autoclave à vapeur d'eau lors des cycles standards (autre que prion), par exemple 121°C/20 min., 125°C/15 min. ou 134°C/5 min. en présence de vapeur d'eau saturée.


## Utilisation

- Placer les indicateurs Steam-Star dans les emballages de stérilisation au contact des dispositifs à stériliser, face imprimée visible à travers la face plastique transparente des sachets.
- Démarrer le cycle de stérilisation de l'autoclave.
- A la fin du cycle, observer la couleur des étoiles et du mot «stérilisé» présents sur les bandelettes.


## Lecture et Interprétation :

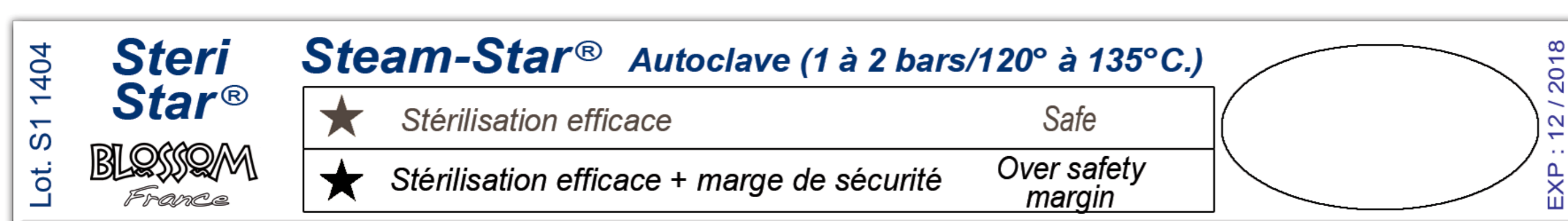

Indicateur **avant** stérilisation

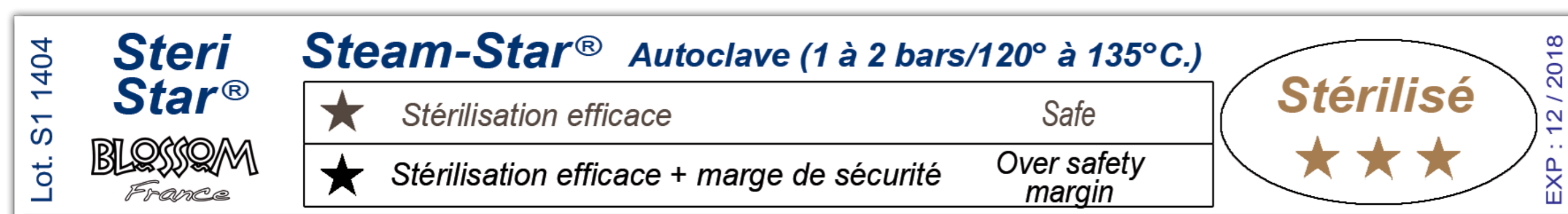

Indicateur **après** stérilisation  
**NON CONFORME**

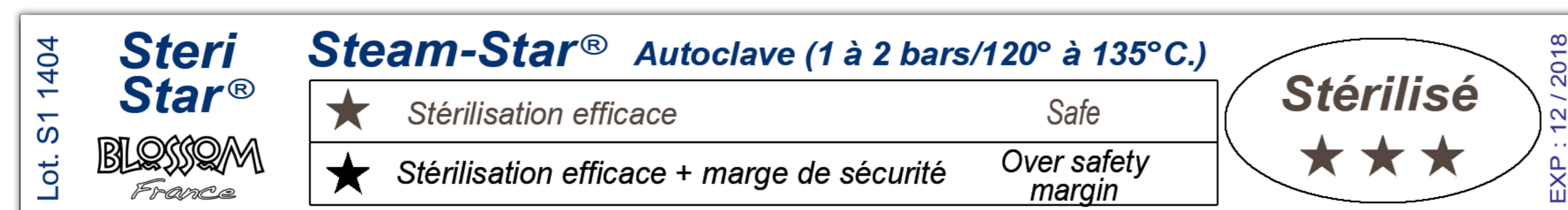

Indicateur **après** stérilisation  
**CONFORME**

Les 3 étoiles et le mot «Stérilisé» présents sur les bandelettes doivent avoir viré **du blanc au marron foncé ou au noir**, indiquant ainsi que les 3 paramètres de la stérilisation (température, temps, vapeur d'eau saturée) ont bien été respectés et que la stérilisation a été correctement effectuée.

### Résultat **conforme** :

- La stérilisation a été correctement effectuée
- La charge peut être acceptée.

### Résultat **non conforme**

- La stérilisation n'a pas été correctement effectuée et la charge doit être refusée.
- Un nouveau cycle de stérilisation doit être réalisé.
- Si le virage des indicateurs est toujours non conforme après le nouveau cycle de stérilisation, un contrôle technique de l'autoclave et une analyse de la charge doivent être effectués.